




www.spazialcreativo.it

**EASYTON
Plus**

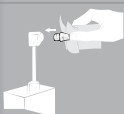

**High Definition Measure
Practical
Disposable
Safe
Easy
Sterile**



**Disposable prism for applanation tonometry
Prisma monouso per tonometria ad applanazione**

EasyTon
MADE IN ITALY 
plus 

EasyOpht 
www.easyopht.com



Remove the tonometer prism from the sterile kit being careful not to contaminate the tip.
Rimuovere il cono dalla confezione facendo attenzione a non toccare la parte che andrà a contatto con l'occhio.



Insert the tip into the tonometer with the line aligned to the zero position.
Inserire il cono all'interno del tonometro allineando la scala graduata alla posizione zero.



Perform the intraocular pressure measurement.
Misurare la pressione endoculare.



Dispose of the used tonometer tip.
Non riutilizzare dopo l'uso.

Each individual EASYTON kit contains a sterile tonometer prism tip. This is all that you need to complete an accurate and sterile tonometry procedure. For your economical convenience EASYTON comes in an attractive dispenser holding 100 pieces.

Una confezione di Easyton contiene un prisma conico, tutto quello di cui è necessario disporre per un'accurata rilevazione tonometrica. Le confezioni di Easyton si trovano in un pratico e conveniente dispenser da 100 pezzi.



COD. 100401 pz.100

For the best use, the slit lamp must be placed between $+20^{\circ}$ - -20° degrees



Practical Pratico

Everything you need for completely sterile tonometry in one pack.
Tutto quello che è necessario per valutare il tono oculare.

Easy Facile

The tonometry prism fits easily on all types of Goldmann tonometers.
Utilizzabile su tutti i tonometri ad appianazione tipo Goldmann in commercio.

Sterile Sterile

Risk of infection is eliminated.
Elimina ogni rischio di infezione.

Disposable Monouso

No need to clean the tonometer prism. Simply throw it away. Your patients will be impressed with your attention to hygiene. You will be impressed with its speed of use.

Il prodotto è stato studiato per un solo utilizzo garantendo così la massima sicurezza per il paziente. L'utilizzatore non dovrà più preoccuparsi della sterilizzazione e rimarrà sorpreso dalla velocità di utilizzo.

Safe Sicuro

Sterilised with ethylene oxide, the tonometer prism is safe to use with no risk of allergic reaction or infection. Grazie alla sterilizzazione con ossido di etilene Easyton è sicuro al 100% eliminando così reazioni allergiche o infezioni.

1,65 gr $\pm$ 0,05

CE 0476

Patented

MADE IN ITALY

FE-Group srl
viale dell'industria 42 - Busto Arsizio (VA)

EasyOpht

Easyopht brand of FE-Group srl
viale dell'Industria, 42 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - ITALY
tel. +39 0331 626 490 - fax +39 0331 325 295
www.easyopht.com - info@easyopht.com



Vertrieb durch:



Vertrieb durch: Firma Salensa • medizinischer Bedarf für das Auge
Fuggerstraße 1a • 88142 Wasserburg • Telefon +49 8382 9430225
www.salensa.de • www.salensa-shop.de • vertrieb@salensa.de