



Sugi Saugtopfer mit Griff, steril (Stumpfe Spitze)

200 Saugtopfer mit Griff
 20 Beutel à 10 Stück
 REF 30901

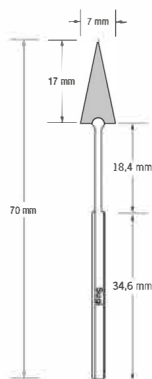

Sugi Saugtopfer mit Griff, steril (Keilform)

200 Saugtopfer mit Griff
 20 Beutel à 10 Stück
 REF 30601

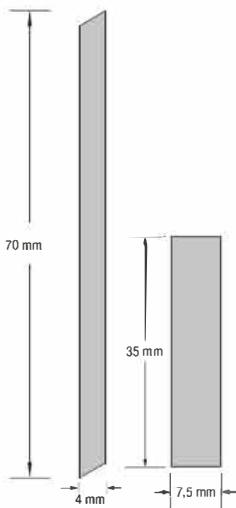


Sugi Saugstreifen steril (rhombisch)

100 Saugstreifen
 10 Beutel à 10 Stück
 REF 31301

Sugi Saugstreifen steril (rechteckig)

200 Saugstreifen
 20 Beutel à 10 Stück
 REF 31002

500 Saugstreifen
 REF 31003

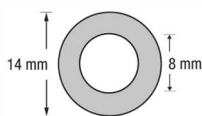

Sugi DARC steril

Drug Application Ring for the Cornea, nach Prof. Spitznas

14 x 8 mm
 25 Beutel à 1 Stück
 REF 30652

10 x 5 mm
 25 Beutel à 1 Stück
 REF 30653

Zusammensetzung

Zellulose ca.: 35 % (m/m)
 Regenerierte Zellulose ca.: 65 % (m/m)

Die Zusammensetzung ist auf das getrocknete Material bezogen.

Eigenschaften

- Sugi Saugprodukte sind aus einem hochwertigen Material auf Zellulosebasis hergestellt.
- Bei Kontakt mit wässrigen Flüssigkeiten erfolgt sofort eine weich-elastische Ausdehnung des Saugmaterials.
- Die Saugfähigkeit beträgt ca. das 17-fache des Eigengewichts.
- Sugi Saugprodukte verfügen über eine hohe Sauggeschwindigkeit.
- Bei nichtwässrigen Flüssigkeiten ist die Saugleistung vermindert.

Hauptanwendungsgebiete

- Ophthalmologie
- Mikrochirurgie
- Zahnmedizin

Sugi Saugprodukte eignen sich vor allem zum Abtupfen in Bereichen, in denen äußerst gewebe-schonendes Vorgehen gewährleistet sein muss, z. B. im Bereich der Ophthalmologie.

Darüber hinaus ermöglichen Sugi Saugprodukte die Speicherung von Flüssigkeiten, wodurch ein Feuchthalten sowie ein mechanischer Schutz erzielt werden kann, z. B. im Bereich der Mikrochirurgie.


Art der Anwendung

Zum Aufsaugen von Blut und Sekret

Als Trägermedium von wässrigen Lösungen z. B. Mydriatika, Miotika (DARC, Saugstreifen).


Zum Feuchthalten des Gewebes (DARC, Saugstreifen).

Zum kontinuierlichen Ableiten von Flüssigkeiten (Eyedrain).

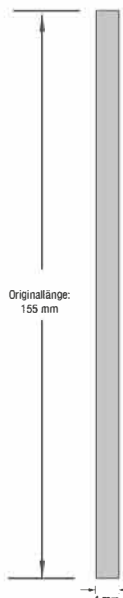

Sugi Eyedrain steril

20 Beutel à 1 Stück
 REF 30622

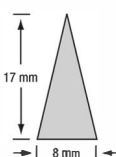

Sugi Saugtopfer steril (Keilform)

200 Saugtopfer
 20 Beutel à 10 Stück
 REF 31602

500 Saugtopfer
 REF 31603

Gegenanzeigen und Unverträglichkeiten

Keine bekannt

Besondere Hinweise

- Sugi Saugprodukte sind wie Verbandstoffe zu entsorgen.
- Die abgebildeten Sugi Saugprodukte sind nicht durch Röntgenstrahlen darstellbar.
- Der Gebrauch von Sugi Saugprodukten ist medizinisch geschultem Fachpersonal vorbehalten.**

Legende

Vor Sonnenlicht schützen	
Verwendbar bis	
Sterilisiert mit Ethylenoxid	STERILE EO
Nicht wiederverwenden	
Trocken aufbewahren	
Charge	LOT
Duales System (nur Deutschland)	
Artikelnummer	REF
Gebrauchsanweisung beachten	
Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	
Temperaturbegrenzung	

Haftungsbeschränkung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, übernimmt die Kettenbach GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

Die Angaben über Kettenbach-Produkte beruhen auf umfangreicher Forschung und anwendungstechnischer Erfahrung.

Wir vermitteln diese Ergebnisse nach bestem Wissen, behalten uns aber technische Änderungen zur Produktentwicklung vor. Das entbindet den Benutzer der Produkte jedoch nicht davon, die Empfehlungen und Angaben bei Gebrauch zu beachten.

Stand der Information: 7. Oktober 2019